



Dentálne implantáty MV 3,6




Postup implantácie

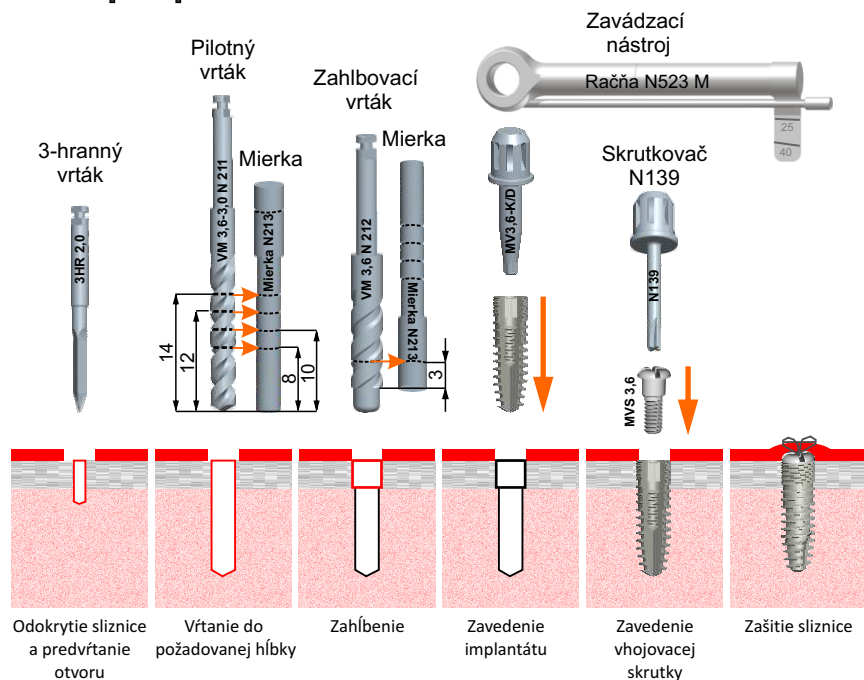

Zavedenie vhojovacieho valčeka na formovanie gingívy

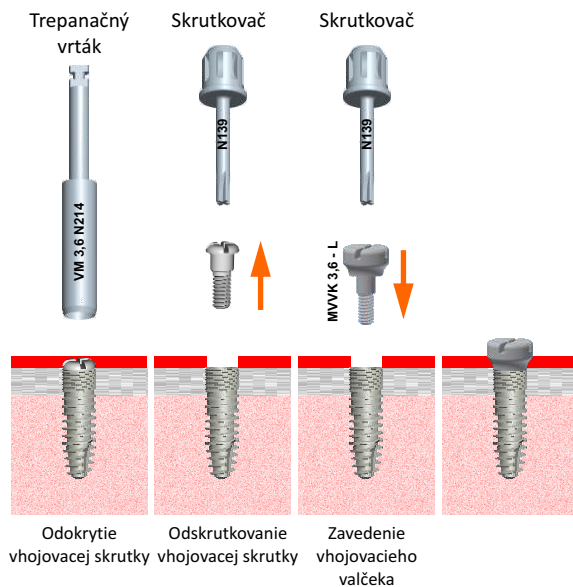


Protetický postup

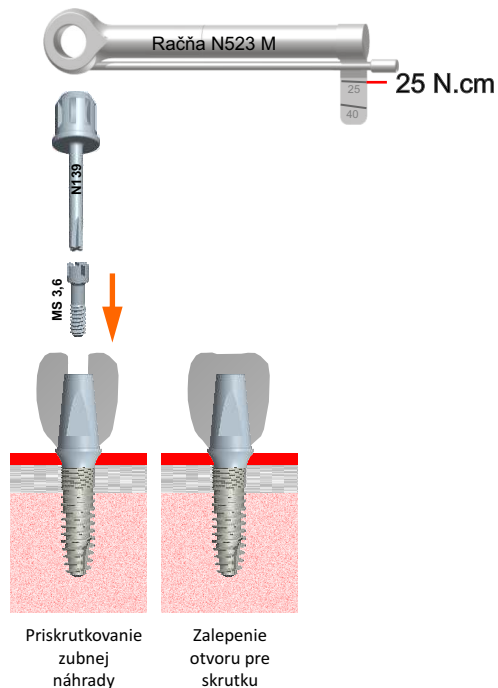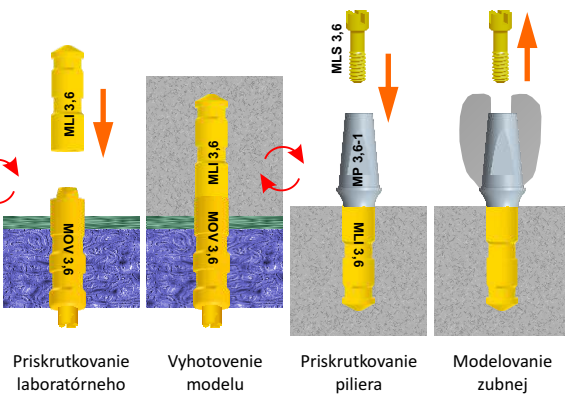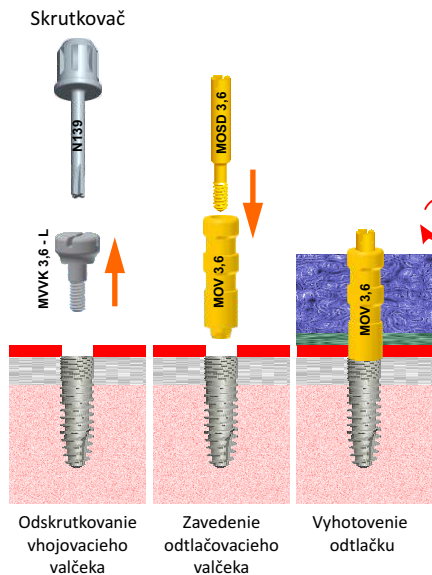

Možnosti protetického riešenia - dentálne implantáty MV3,6 a MV4,5

Náhrada jednotlivého zuba, parciálna, totálna náhrada

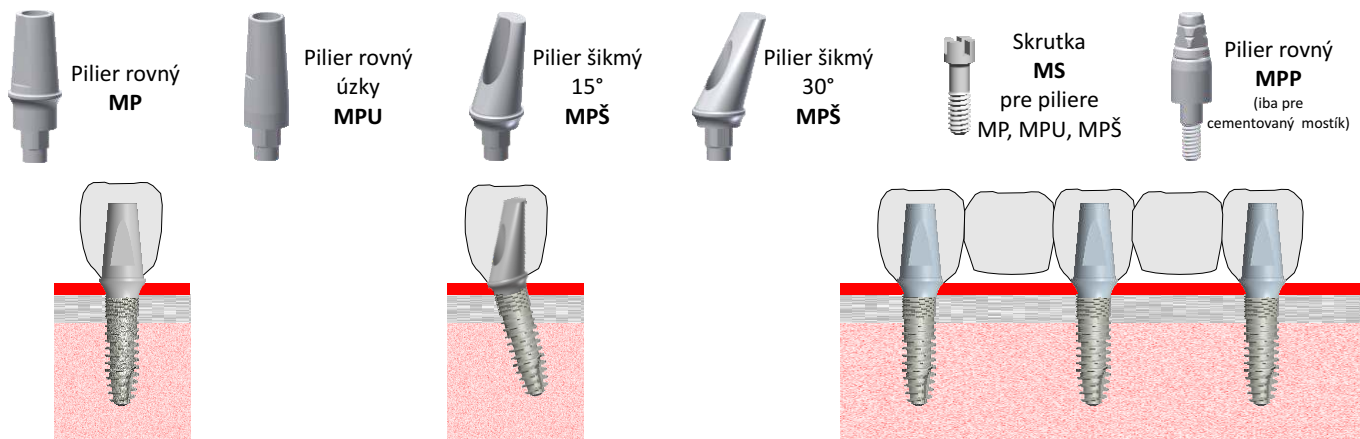


Náhrada jednotlivého zuba


Angulovaná náhrada

Parciálna / totálna náhrada

Snímateľná protéza

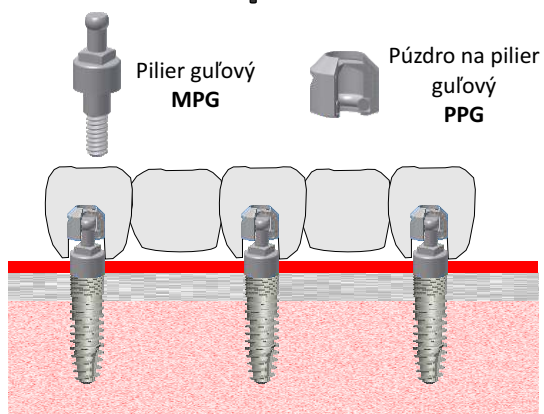


Skrutkový mostík

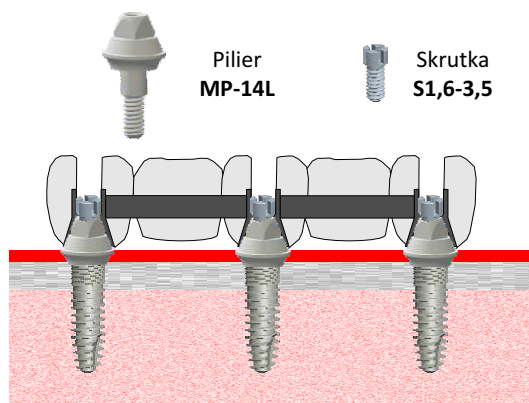


Dentálne implantáty MV 4,5


Postup implantácie

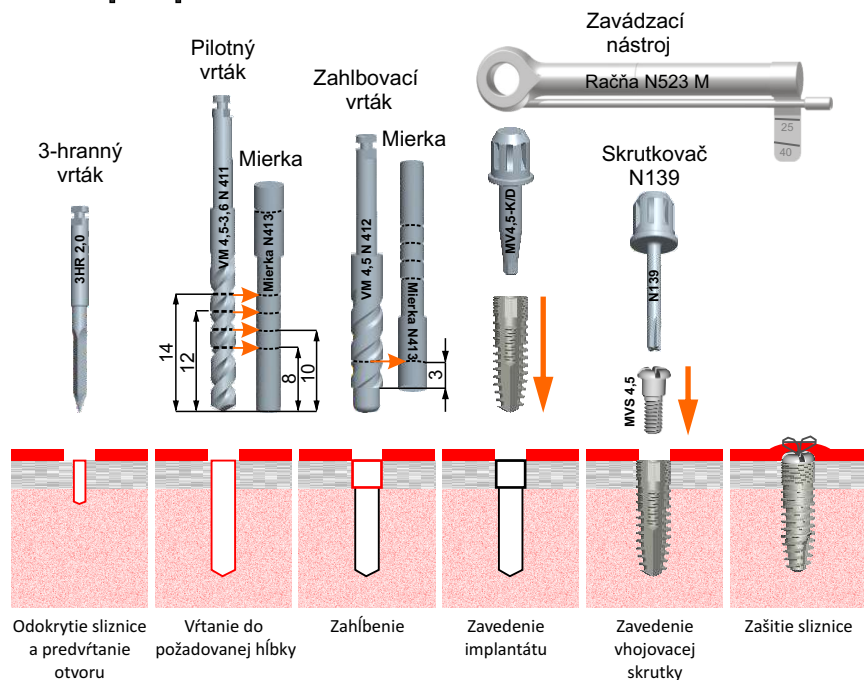

Zavedenie vhojovacieho valčeka na formovanie gingívy

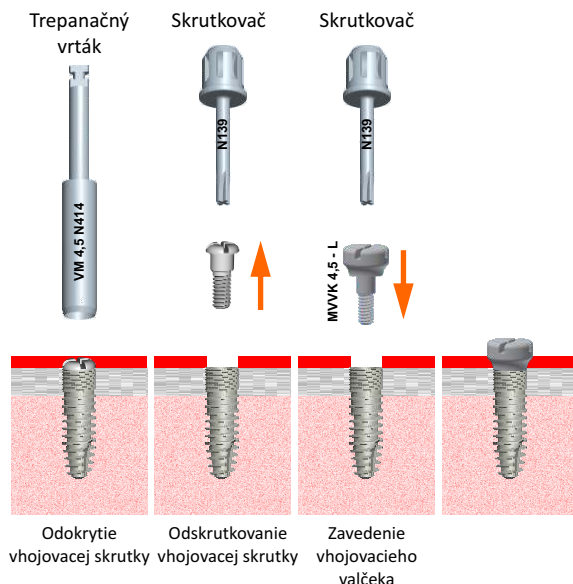


Protetický postup

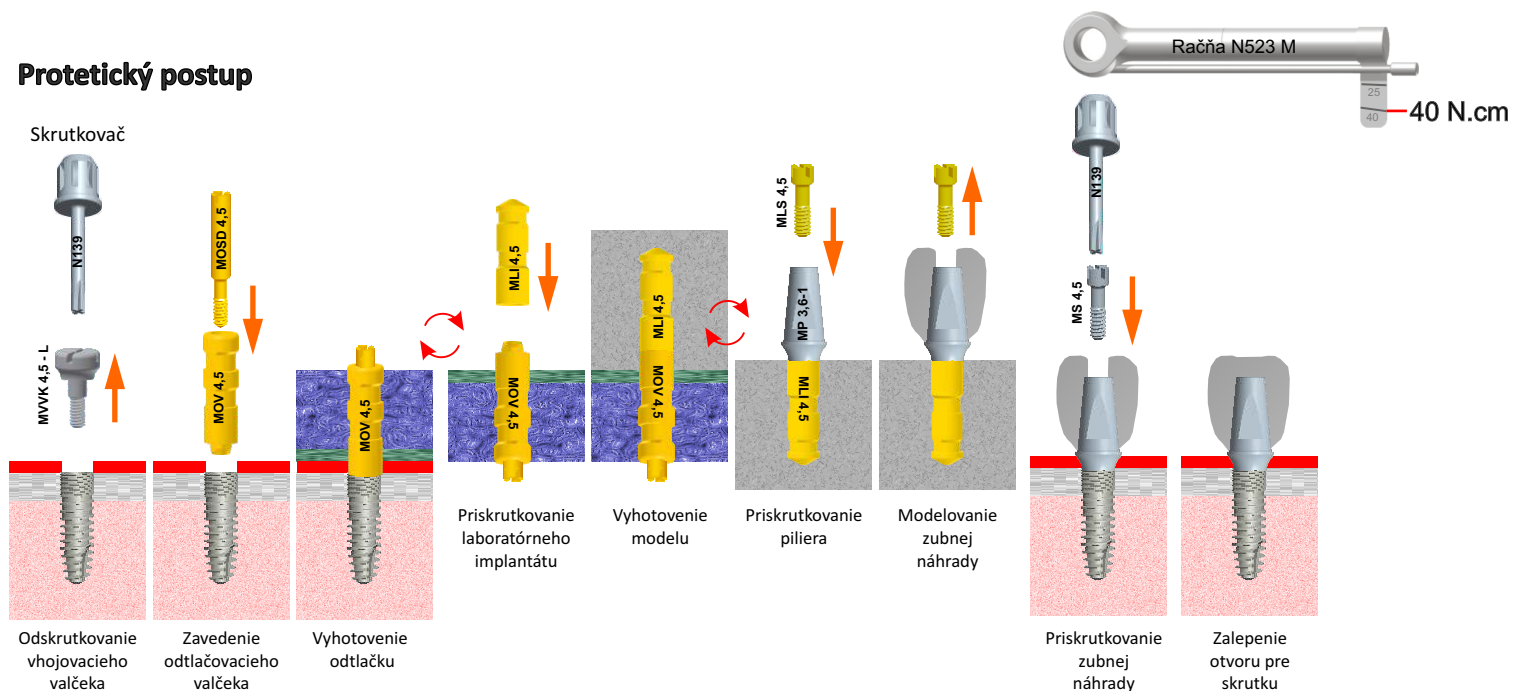


Dentálne implantáty SVMB

SVMB 3,0 - L

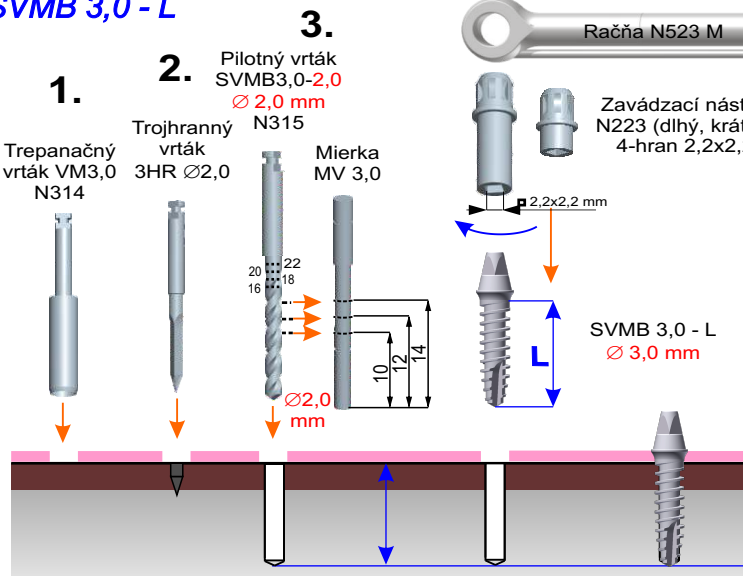


1. Vykrojiť sliznicu
2. Navŕtať strediaci otvor
3. Vyvŕtať otvor $\varnothing 2,0$ mm pre implantát do hĺbky podľa dĺžky implantátu „L“ - zmerať podľa mierky.
4. Zaskrutkovať implantát pomocou zavádzacieho nástroja a račne.
- Pozor! Pomaly skrutkovať, aby sa neprehriala kosť!

SVMB 3,6 - L

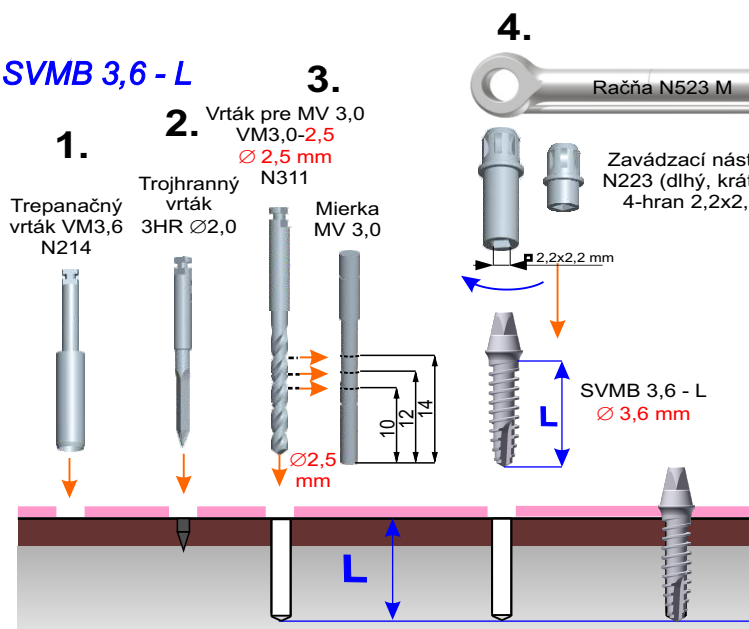

1. Vykrojiť sliznicu
2. Navŕtať strediaci otvor
3. Vyvŕtať otvor $\varnothing 2,5$ mm pre implantát do hĺbky podľa dĺžky implantátu „L“ - zmerať podľa mierky.
4. Zaskrutkovať implantát pomocou zavádzacieho nástroja a račne.
- Pozor! Pomaly skrutkovať, aby sa neprehriala kosť!

SVMB 4,5 - L

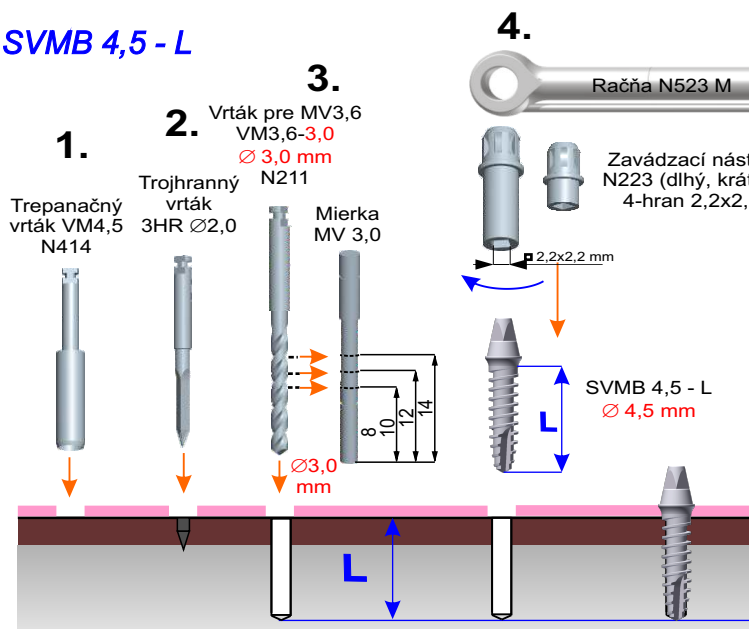

1. Vykrojiť sliznicu
2. Navŕtať strediaci otvor
3. Vyvŕtať otvor $\varnothing 3,0$ mm pre implantát do hĺbky podľa dĺžky implantátu „L“ - zmerať podľa mierky.
4. Zaskrutkovať implantát pomocou zavádzacieho nástroja a račne.
- Pozor! Pomaly skrutkovať, aby sa neprehriala kosť!

**Protetický
postup
SVMB-14A**

Dentálne implantáty SVMB 14A

